



Brug

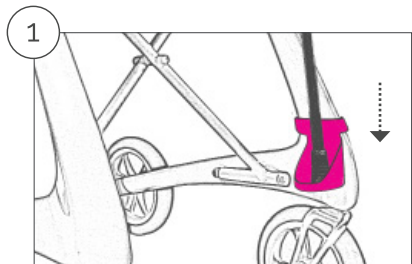

1. Placer bunden af stokken i den nederste del af stokkeholderen.
2. Pres derefter stokken ind i stokkeholder-clipsen som sidder på siden af sæderammen.

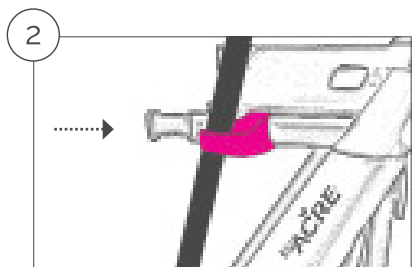

For at afmontere stokken skal du skubbe den fremad indtil stokken er ude af den øverste clips. Løft den derefter ud af den nederste del af stokkeholderen.

Tekniske specifikationer

Materiale: 3D-print

Højde: 10 cm

Bredde: 6 cm

Diameter: 5,5 cm


Vedligeholdelse

Stokkeholderen kan rengøres med en våd klud. Hvis der er behov for grundigere rengøring kan der også bruges en smule opvaskemiddel.

Stokkeholder

HOLDER DIN STOK PÅ PLADS, MENS DU GÅR

CARBON ULTRALIGHT TILBEHØR

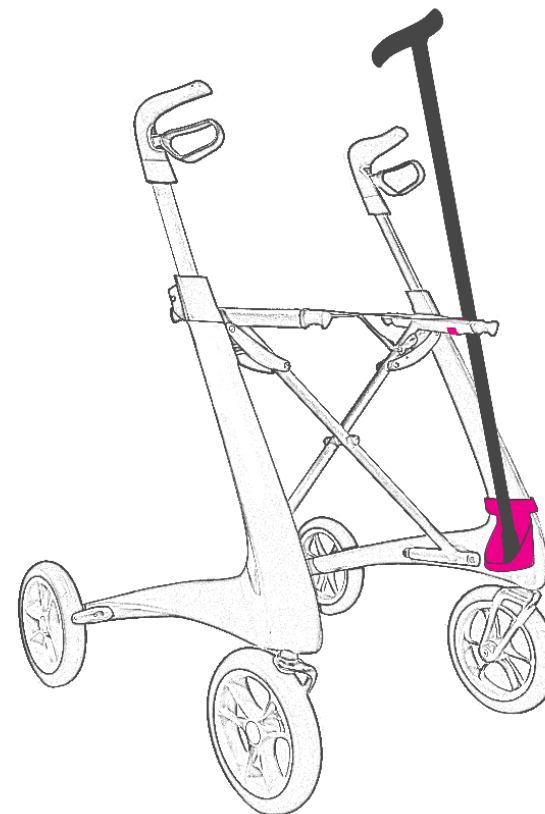

Tillykke med din nye stokkeholder!
Vi har lavet denne brugermanual til dig, så du hurtigt kan få glæde af din nye, smarte stokkeholder.

by **ACRE**

Designet i Danmark. Håndlavet i Kina.

byACRE ApS, I.C. Modewegsvej 1, 2800 Lyngby

DANISH


by **ACRE**

Brug af stokkeholderen


Stokkeholderen er nem at montere og har et indbygget afløbshul i bunden, så vand og snavs ikke samles.

Illustrationerne i denne manual tager udgangspunkt i en stokkeholder til højre side. Har du købt en stokkeholder til venstre side skal du derfor blot udføre monteringen og afmonteringen i venstre side i stedet.


Montering

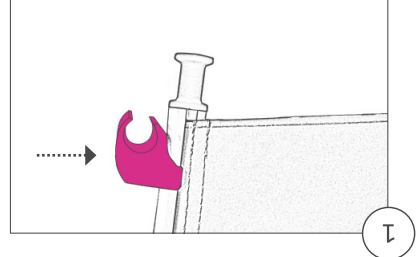

1. Klik clipsen på sæderammen i den side, hvor du skal have din stokkeholder monteret.

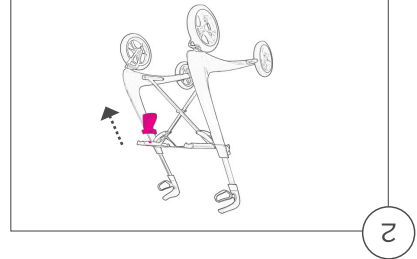


2. Skub stokkeholderen ind på det øverste punkt af rollatorrammen og skub den nedad...

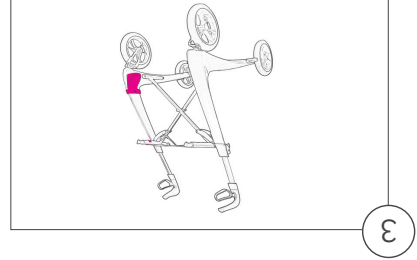


3. ... indtil den sidder stabilt på den bredeste del af rollatorrammen.


Afmontering

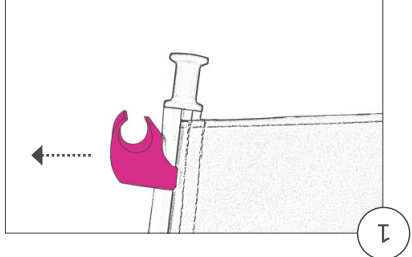

1. Tag clipsen af sæderammen.

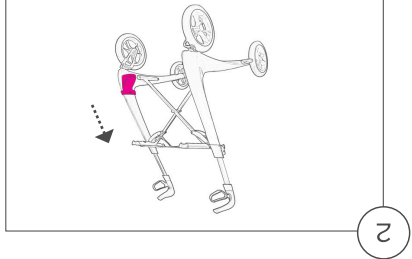

2. Træk stokkeholderen op langs rammen ...

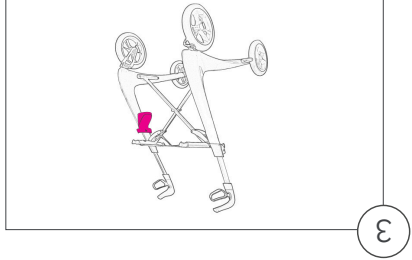

3. ... indtil den kan tages af.