



Utilisation

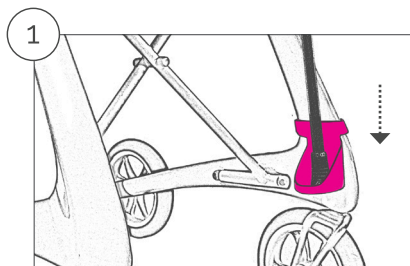

1. Placez le bas de la canne dans la partie basse du porte canne est fixez la canne sur la partie haut au cadre du siège.

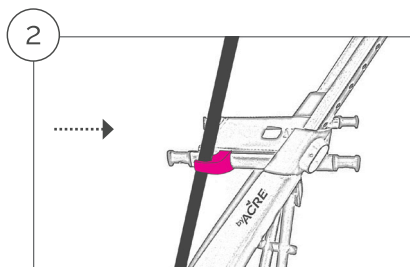

2. Pour détacher la canne, poussez-la simplement vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit libérée du clip situé sur la structure du siège. Soulevez ensuite la canne hors de la partie inférieure du porte-canne.

Spécifications techniques

Matériel: 3D Print

Hauteur: 10 cm

Largeur: 6 cm

Diamètre: 5,5 cm


Entretien

La canne peut être nettoyée avec un chiffon humide. Si nécessaire, il peut également être nettoyé avec un peu de liquide vaisselle.

Porte Canne

GARDEZ VOTRE CANNE PRÈS DE VOUS PENDANT LA MARCHÉ

CARBON ULTRALIGHT ACCESSOIRE

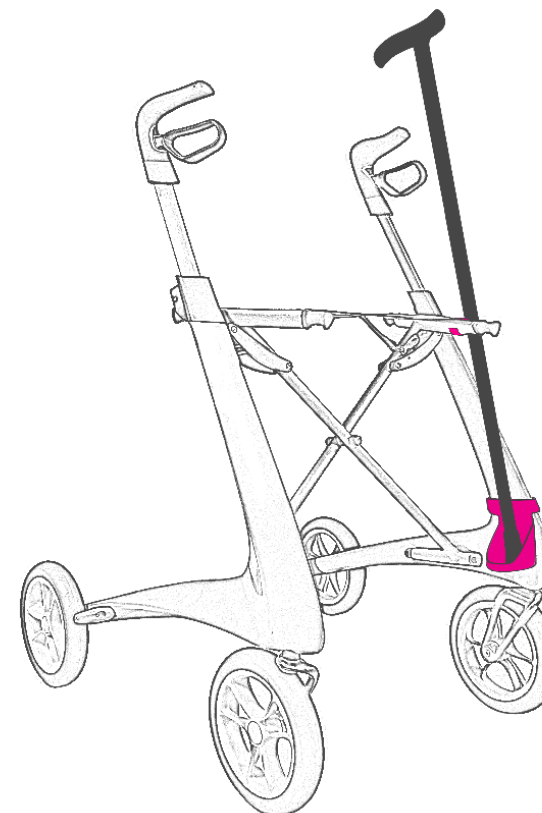

Félicitations avec votre nouveau porte canne!
Nous avons créé ce manuel pour que vous puissiez profiter de votre porte canne au plus vite possible

by **ACRE**

Conçu au Danemark. Fabriqué à la main en Chine.
byACRE ApS, I.C. Modewegsvej 1, 2800 Lyngby

FRENCH


by **ACRE**

Utilisation du porte canne


Ce porte canne est facile à fixer et comporte un trou au bas, de sorte que l'eau et la saleté ne puissent pas s'accumuler.

Les illustrations de ce manuel sont basées sur le support de manche pour le côté droit. Si vous avez un porte-bâton pour le côté gauche, fixez-le et relâchez-le à gauche.


Attachement

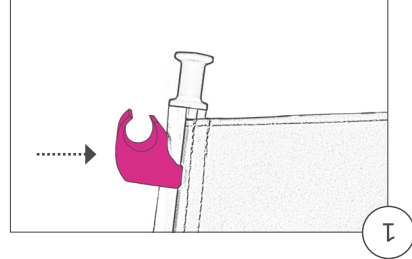


1. Cliquez le petit clip sur le cadre du siège du côté où le porte-bâton doit être placé.

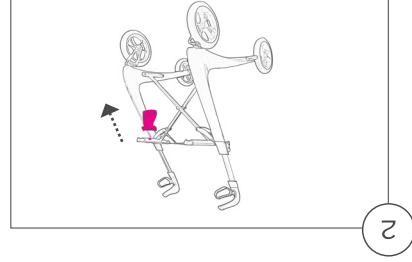


2. Cliquez la partie basse du porte canne sur la partie la plus étroite du cadre en haut et poussez-la jusqu'à ce qu'elle soit placée sur la partie la plus large du cadre.

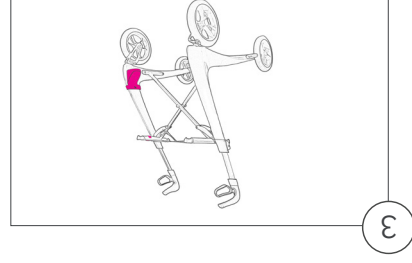

Détachement

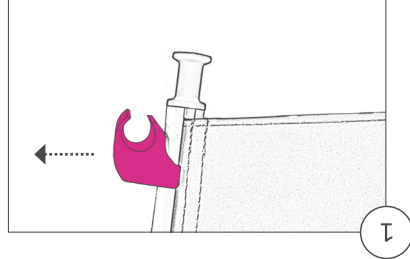

1. Décliquez le clip du cadre du siège.

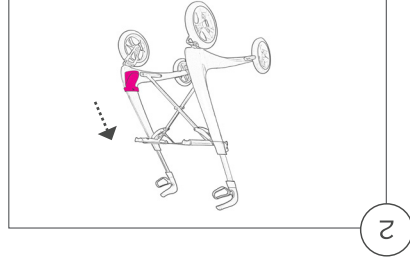

2. Tirez doucement la partie inférieure de la canne vers le haut le long du cadre du rollator jusqu'à ce qu'elle puisse être détachée du cadre.

