



Opmerking: Het maximale gewicht is 130 kg (285 lbs). De handgreep hoogte op de maat Compact is 79 - 91 cm (31,1" - 35,8") en de bij Normaal en Comfort is 80 - 95 cm (31,5" - 37,4") and the Regular- and Wide Track is 80 - 95 cm (31,5" - 37,4").

Als jouw meting van vloer tot pols niet binnen deze afmetingen past is deze rollator waarschijnlijk niet perfect voor jou.

#### Andere dingen om te overwegen:

##### Stoelhoogte

Het belangrijkste verschil tussen de Compact en Normaal is de zithoogte. Hoe hoger de stoel, hoe gemakkelijker het is om in en uit de stoel te stappen.

##### Lichaamsvorm en flexibiliteit

Door het ergonomische ontwerp van de handvatten zijn ze aan de bovenkant smaller. Dit betekent dat, hoewel de zitbreedte goed past, je misschien een beetje "salsa" moet doen om rond de handgrepen in de stoel te komen. Als je je niet prettig of flexibel genoeg voelt om dit te doen, raden we aan om een breder model te kiezen.

##### Gebruik van stoel

Hoe vaak je de stoel gebruikt is van belang voor je keuze. Als je de stoel regelmatig wilt gebruiken om uit te rusten is een bredere stoel een comfortabelere optie. Als je niet veel zit en je het prima vindt om een beetje "salsa" te doen bij het zitten en opstaan dan zou een smaller model een goede match zijn.

##### Gebruik binnen versus buiten

Als je van plan bent je rollator voornamelijk binnen te gebruiken, met een stoel in de buurt en smalle looppaden, is een smaller model aan te raden omdat dit minder ruimte inneemt en makkelijker door deuren past.