



Nota: il peso massimo è di 130 kg (285 libbre). L'altezza dell'impugnatura del cingolo compatto è di 79-91 cm (31,1"- 35,8") e del cingolo regolare e comfort è di 80-95 cm (31,5" - 37,4").

Se la misura dal pavimento al polso non rientra in questo intervallo, è probabile che questo rollator non sia adatto alle tue esigenze.

#### **Altri aspetti da considerare:**

##### **Altezza del sedile**

La differenza principale tra il Compatto e il Regolare Track è l'altezza del sedile. Più il sedile è alto, più è facile salire e scendere dal sedile.

##### **Forma del corpo e flessibilità**

Il design ergonomico delle impugnature significa che sono più strette nella parte superiore. Questo significa che, anche se la larghezza del sedile è adatta, potrebbe essere necessario fare un po' di "movimento" intorno alle impugnature per entrare nel sedile. Se non ti senti abbastanza comodo o flessibile per farlo, consigliamo di scegliere un modello più largo.

##### **Utilizzo del sedile**

L'uso che si fa del sedile è importante per la scelta del modello. Se si usa spesso il sedile per riposare, un sedile più largo sarà un'opzione più comoda. Se non si sta molto seduti e si è disposti a fare un po' di "movimento" quando si sale e si scende dal sedile, allora un modello più sottile sarà più comodo.

##### **Uso interno o esterno**

Se si prevede di utilizzare il rollator soprattutto all'interno, con sedie vicine e passaggi stretti, è consigliabile un modello più sottile, in quanto occupa meno spazio e ha un margine maggiore per passare attraverso le porte ecc.